


WINCARE	Návod k použití Polštáře z viskoelastické pěny	
	ALOVA GALBE - ALOVA ERGONOMIC CE	

URČENÉ POUŽITÍ

Prevence proleženin při dlouhodobém sezení.

INDIKACE

Sedící pacient se sníženou pohyblivostí, bez asymetrie opory a bez rizika sklouznutí dopředu, s rizikem vzniku proleženin "středního až vysokého" stupně (podle Bradenovy stupnice nebo jiné validované stupnice a podle názoru lékaře). Ochrnutí trupu a/nebo dolních končetin, anamnéza ischiálních nebo sakrokokcygeálních proleženin, poruchy citlivosti dolních končetin, spasticita, cévní amputace.

KONTRAINDIKACE

Pacient s poruchou frontální nebo sagitální stability. Složené sakrokokcygeální a/nebo ischiální proleženiny. Hmotnost pacienta překračuje limity stanovené v tabulce technických údajů.

NEŽÁDOUCÍ VEDLEJŠÍ ÚČINKY

Nestabilita trupu v dynamické poloze. Sklouznutí pánve v sagitální rovině. Ztráta účinnosti při přesunu ze sedu do stoje. Nestabilita při posunutí trupu stranou.

Jakákoliv závažná událost v souvislosti s prostředkem musí být hlášena výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient občanem. Informujte příslušný orgán, pokud se domníváte nebo máte důvod se domnívat, že prostředek představuje vážné riziko nebo že se jedná o falšovaný prostředek.

SLOŽENÍ ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU / TECHNICKÉ ÚDAJE

	VCAG				VCAE
Verze	VCAG3636, CAG3841, VCAG4041, VCAG4340, VCAG4341, VCAG4043, VCAG4343, VCAG4347, VCAG4540, VCAG4544, VCAG5044	VCAG5250, VCAG5450, VCAG5650, VCAG6050	VCAG4343XL, VCAG5044XL	VCAG3841(BP), VCAG4041(BP), VCAG4544(BP), VCAG4347(BP), VCAG5044BP, VCAG4341(BP), VCAG4343(BP)	VCAE/M4343
Rozměry	Rozměry délky a šířky jsou uvedeny v odkazu				
Tloušťka	6 cm	7 cm	9 cm	6 cm	9 cm
Povrch	Viskoelastický > 75 kg/m ³ .				
Pěnová základna	-	-	HR > 34 kg/m ³ .	-	-
Ochrana	Snímatelný potah z PU 30% / polyesteru 70% a protiskluzová spodní strana				Promust PU
Minimální a maximální hmotnost pacienta	30 až 120 kg podle odkazu	120 až 200 kg podle odkazu	30 až 135 kg podle odkazu	30 až 135 kg podle odkazu	30 až 100 kg

Uvedené odkazy mohou být doplněny koncovkou, která tvoří obchodní odkaz (příklad VCAG4343-TH).

KLINICKÝ PŘÍNOS, VÝKON ZAŘÍZENÍ, MECHANISMUS ÚČINKU

VÝKONNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY ZAŘÍZENÍ: Viskoelastický pěnový materiál umožňuje ponoření pánve a obalení oblastí před kostními výčnělky (sedací kost, kostrč, trochanter).

OČEKÁVANÉ KLINICKÉ PŘÍNOSY: Udržení oxykšení v kožních a podkožních tkáních, které jsou v kontaktu s podpurným prostředkem.

INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Několikrát denně sledujte stav pokožky pacienta, která je v kontaktu s polštářkem. Pacienta s ischiálními a kokcygeálními proleženinami neposazujte. Zkontrolujte, zda je sedadlo židle v dobrém stavu. U invalidního vozíku zkontrolujte výškové nastavení područek, opěrek nohou, (...) a výkon pohonu.


POŽADAVKY PŘED POUŽITÍM A NÁVOD K POUŽITÍ

ŠKOLENÍ A KVALIFIKACE UŽIVATELE PROSTŘEDKU: školení uživatelů musí provádět osoby vyškolené a ověřené příslušnými subjekty, zejména pokud jde o bezpečnost a hlášení nesouladu.

INSTALACE ZAŘÍZENÍ: Polštář je dodáván s nasazeným potahem. Výrobek je připraven k instalaci. Horní strana polštáře, která je v kontaktu s pacientem, je vyrobena z viskoelastické pěny, má ischiatické křivky a kostrční reliéf vzadu a zevní rotátor vpředu. Nepoužívejte polštář ALOVA GALBE a ERGONOMIC bez potahu.

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA: Pravidelně provádějte vizuální kontrolu stavu potahu (vzhled povrchu a zipů) a vystavení vnitřního povrchu světelnému zdroji (absence děr a/nebo trhlin) a každoročně kontrolujte stav povrchu pěny. Pokud se změnil vzhled potahu, vyměňte jej. Protiskluzový povrch je v kontaktu se sedákem židle. Rukojeť (na spodní straně výrobku) by měla směřovat k přední straně polštáře.

ČISTĚNÍ A DEZINFEKCE

Proces						
Obal Promust PU	Jemně praní do 90 °C	Maximální povolená koncentrace chloru 5000 ppm	Nežehlete	Nečistěte chemicky	Sušení se sníženým tepelným namáháním	Použití povoleného povrchového detergentu/dezinfekčního prostředku

INFORMACE O VHDNÝCH POSTUPECH UMOŽŇUJÍCÍCH JEHO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

Před opětovným použitím pro jiného pacienta musí být výrobek po provedení výše uvedených postupů fyzicky a bakteriologicky čistý. Výrobek ošetřený biocidní látkou bez rizika pro uživatele. www.winnicare.com

Vyhnete se přímému kontaktu mokrého polštáře s pokožkou. Polštáře vždy chraňte dodaným potahem. Nepoužívejte žádné drátěnky, čisticí prostředky nebo rozpouštědla ani ostré předměty, které by přišly do přímého kontaktu s obalem.

UPOZORNĚNÍ, BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ, POŽADOVANÁ OPATŘENÍ**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ**

Pacient s poraněním kostí a/nebo svalů a/nebo kůže v oblasti pánve a stehna při kontaktu. Nestabilita při sezení.

Tlaková bolest je více či méně hluboká kožní léze spojená s nadměrným a dlouhodobým stlačením tkání mezi tělem a operným povrchem. Tento nadměrný tlak může potlačit krevní oběh a vést ke vzniku otlaku, který je nebezpečný, protože se vyvíjí zevnitř těla směrem ven, a proto je zpočátku neviditelný. Tlaková rána může mít několik podob: pouhé zarudnutí přetrvávající déle než jeden den, otlaky na kůži, více či méně hluboké rány, které mohou ve vážných případech zasahovat až do svalů nebo do kostí.

Tlak (max) v mmHg před stárnutím, při maximální ověřené hmotnosti, měřeno naplocho (0°)

VHDNOST PRO DANÝ ÚČEL	Hmotnost uživatele	Hlava	Ischias	Pata
Polštář ALOVA GALBE (mm Hg)	100 kg	NA	91,20	NA
ERGONOMICKÝ polštář (mm Hg)	100 kg	NA	85,32	NA

SKLADOVÁNÍ, MANIPULACE, LIKVIDACE**PODMÍNKY POUŽITÍ A SKLADOVÁNÍ**

Média by měla být skladována nejlépe na plocho, mimo dosah přímého světla a nadměrné vlhkosti.

	Použijte	Úložiště
Teplovní rozsah	+15 °C až +45 °C +59°F až +113°F	-5°C - 60°C +41°F až +140°F
Rozsah vlhkosti	30% - 70%	10% - 90%

ŽIVOTNOST

Odhadovaná životnost polštářů je 6 let.

LIKVIDACE VÝROBKU

Nevyhazujte výrobek mimo vyhrazené prostory pro odpad. Respektujte zavedené systémy recyklace ve vaší zemi.

ZÁRUKA

Záruční doba na polštáře je 3 roky. Tato záruka začíná dnem zakoupení výrobku od distributora. V případě použití jedním pacientem se záruka týká sedáku a ochranného obalu.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku a jeho ochranného obalu a nenahrazuje zákonné záruky. Obráťte se na svého distributora a předložte mu příslušný výrobek. Poté podnikne s naší společností nezbytné kroky k provedení opravy nebo standardní výměny.

Osvědčení o technické shodě


FCBA - Č. ESC 19-006	FCBA - Č. ESC 19-008	FCBA - Č. ESC 13-007	FCBA - Č. ESC 15-003
Zakřivený polštář ALOVA Standard	Zakřivený polštář ALOVA Technical XL	Zakřivený polštář ALOVA Technical BP	Ergonomický polštář ALOVA Standard
Zakřivený polštář ALOVA Standard < 38 cm			
Zakřivený polštář ALOVA Standard > 45 cm			

Zdravotnický prostředek třídy I podle nařízení (EU) 2017/745.

Systém řízení: Kvalita: ISO 13485:2016 - Životní prostředí: ISO 14001:2015

Složení balení

- 1 polštář
- 2 obaly. Pro referenci tlaku, potah se sedákem pro podporu pánve
- 1 návod k použití

 WINNICARE FRANCE - 4, Le Pas du Château - 85670 Saint-Paul-Mont-Penit - France
Tél. +33 (0)2 51 98 55 64 - Fax +33 (0)2 51 98 59 07
Site de production ASKLE SANTE
200 Rue Charles Tellier - 30034 Nîmes Tél. : +33 (0)4 66 02 15 15 - Fax : +33 (0)4 66 02 15 00
www.winnicare.com



Vytvořeno dne 30/12/2012.
Aktualizováno dne 21/06/2022
Verze číslo 13