

Instrukcja używania

Návod k použití

Producent/Wýrobce:

 MDH Sp. z o.o.
ul. Maratońska 104
94-007 Łódź
tel. +48 42 636 81 44
www.qmedbymejra.pl

Wydanie: 22.06.2023

Wydání: 22.06.2023



Qmed[®]
BY MEYRA



PL APARAT STACKA

CZ STACK APPARATUS

NUMER KATALOGOWY / KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQF3A

PL

CZ

Opis produktu / Popis produktu

Lekka, higieniczna orteza palcowa ręki z szyną naparstkową do natychmiastowego zastosowania. Skuteczna w terapii urazów palców ręki. Kolor cielisty.

Lehká hygienická prstová ortéza s náprstní dlahou pro okamžité použití. Účinné při léčbě poranění prstů. Masové barvy.

Wskazania / Indikace

Unieruchomienie w stawach międzypaliczkowych dalszych palców ręki, uszkodzenie prostownika palca, złamania awulsyjne, złamania kości paliczek dalszych.

Imobilizace v distálních interfalangeálních kloubech prstů, poškození extenzoru prstu, avulzní zlomeniny, zlomeniny distálních článků prstů.

Przeciwwskazania / Kontraindikace

Uszkodzenia i urazy w okolicy poniżej części dalszej paliczka, otwarte rany okolicy obejmującej stabilizację.

Poškození a poranění v oblasti pod distální falangou, otevřené rány v oblasti zahrnující stabilizaci.

Sposób użycia / Použití

Po dopasowaniu odpowiedniego rozmiaru wsuwamy ortezę na palec (otwartą częścią na paznokcie), następnie unieruchamiamy plasterem bez opatrunku (nie dołączony do ortozy).

Po zvolení vhodné velikosti ortézu nasuneme na prst (otevřenou částí směřující k nehtu), poté ji znehybníme náplastí bez obvazu (není součástí ortézy).

Konserwacja / Údržba

Do czyszczenia użyć ciepłej wody z delikatnym środkiem myjącym. Przechowywać z daleka od źródeł ciepła.

K čištění použijte teplou vodu a jemný čisticí prostředek. Skladujte mimo zdroje tepla.

PRZED ZASTOSOWANIEM WYROBU ZALECA SIĘ SKONSULTOWAĆ Z LEKARZEM SPECJALISTĄ.

PŘED POUŽITÍM PRODUKTU DOPORUČUJEME PORADIT SE S ODBORNÍKEM.



UWAGA / VAROVÁNÍ

Každý poważný incident związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

Jakýkoli vážný incident týkající se prostředku by měl být oznámen výrobcí a příslušnému orgánu členského státu, kde má uživatel nebo pacient bydliště.

Objaśnienie zastosowanych symboli: /Popis použitých symbolů:











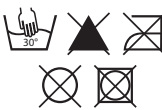
	Producent Výrobce
	Data produkcji Datum výroby
	Numer serii/partii Šarže/číslo šarže
	Ostrzeżenie Varování
	Zajrzyj do instrukcji używania Viz návod k použití
	Chronić przed wilgocią Chraňte proti vlhkosti
	Chronić przed światłem słonecznym Chraňte před slunečním zářením
	Numer katalogowy Katalogové číslo
	Wyrób medyczny Zdravotnický prostředek
	Zgodność z Rozporządzeniem UE 2017/745 V souladu s nařízením (EU) 2017/745
	Zaleca się krótkie i dokładne pranie ręczne w 30 °C, nie używać wybielacza, nie prosować, nie czyścić chemicznie, nie używać odplamiaczy zawierających rozpuszczalnik, nie używać suszarki bębnowej Doporučeno práť krátce a důkladně v ruce na 30 °C, nepoužívat bělidla, nežehlit, chemicky nečistit, nepoužívat odstraňovače skvrn obsahující rozpouštědla, nepoužívat sušičku prádla

Tabela rozmiarów / Tabulka velikostí

Rozmiar / Velikost	2	3	4	5	5,5	6	7
Obwód palca w stawie międzypaliczkowym dalszym (cm) / Obvod prstu v distálním interfalangeálním kloubu (cm)	5,5-6,0	6,0-6,5	6,5-7,0	7,5-8,0	8,5-9,0	9,5-10	10,5-11

