

HALLUDUO – Silikonový korektor s dvojitým kroužkem (I208)

Silikonový korektor na hallux valgus s anatomickým tvarem dokonale přilne a přizpůsobí se tvaru prstů. Je vybaven kroužkem, který se umísťuje na vedlejší prst a tím zabraňuje nechtěnému posunutí korektoru.

Indikace:

Prevence tvorby vbočených palců, zmírnění bolesti související s haluxy.

Kontraindikace:

Změny kůže v důsledku působení pomůcky.

Použití:

Vložte korektor mezi palec a druhý prst a umístěte silikonové kroužky na oba prsty. Pomůcku nepoužívejte déle než 16 hodin denně. Pomůcka je určena pouze k zevnímu použití. Nepoužívejte na otevřené rány. Pacienti trpící cukrovkou nebo s nízkým krevním tlakem by se měli před použitím poradit se svým ošetřujícím lékařem.

Údržba:

Skladujte mimo přímé sluneční světlo a zajistěte, aby se výrobek nezkroutil. Pomůcku omyjte vlažnou mýdlovou vodou. Sušte mimo umělé zdroje tepla. Před opětovným použitím naneste mastek.

Balení: 1 pár

Velikost: univerzální

Složení: 100% TPE

Označení: DRIE0C0XXXUP

Basic UDI-DI: 59017804DRIE0CJN

Výrobce:

mdh sp. z o.o.

ul. Maratońska 104

94-007 Łódź, Polsko

tel. +48 42 674 83 33

e-mail: profilaktyka@mdh.pl

Distributor:

MEYRA ČR s. r. o.

Hrusická 2538/5

141 00 Praha 4

tel.: +420 272 761 102

e-mail: meyra@meyra.cz

www.meyra.cz



12/2021